



fluorecare® Thyroid Peroxidase Antibody (Anti-TPO) Diagnostic Kit


- Immunochromatographic Assay
- fluorecare® FIA Quantitative POCT Platform

- **Certificazione CE mark**
 - **POCT** Point of care test , risultato in 12 minuti
- **Automatico** Calibrazione Interna - nessuna procedura manuale
- **Costo Reale** Una cassetta per un test, nessun costo aggiuntivo
- **Temperatura** Stoccaggio e operazioni a temperatura ambiente
 - **Raro** Unico su piattaforma FIA
 - **Accurato** Risultati accurati sovrapponibili ai test ELISA e CLIA

Componenti



fluorecare® Anti-TPO VS Roche Anti-TPO

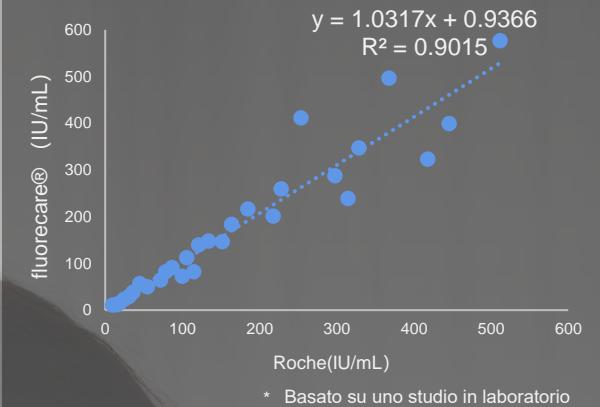

Specifiche

Metodo	Immunocromatografico - Fluorimetrico
Tempo di Reazione	12 minuti
Emivita	18 mesi
Temperatura di Stoccaggio	2-30°C
Tipo Campione	Siero, plasma
Volume Campione	40µL
Temperatura di Incubazione	20-25°C
Confezionamento	20 Tests/box, 25 Tests/box
Range	0-34 pg/mL
Applicazione Strumentazione	fluorecare® MF-T1000 Dry-type Immunofluorescence Quantitative Analyzer

Procedura Analitica



1 Inserire l'ID chip, e cliccare [Leggi ID Card]



2 40µL di siero o plasma nella fiala di diluente e miscelare bene



3 70µL di campione miscelato nel pozzetto del dispositivo e attendere 12 minuti



4 Inserire la card nell'analizzatore. Cliccare [Test] e attendere il risultato.

