


fluorecare®

Calprotectina Fecale Rilevazione Quantitativa



Tipo di Campione: Feci
Codice Prodotto: MF-125

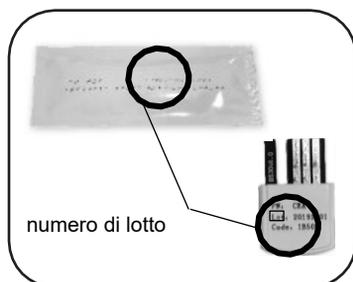

numero di lotto


1 Verificare che il lotto dell'ID chip sia uguale a quello del reagente.



2 Accendere l'analizzatore e cliccare sulla voce **【Test】** sul display.




3 Inserire l'ID chip, e cliccare **【Read ID Card】**
Selezionare il tipo di campione: Feci.

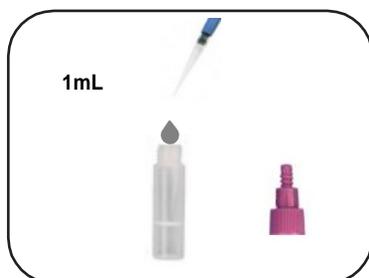

1mL

4 Aprire il flacone del diluente e dispensare 1 ml. nel tubo di estrazione.

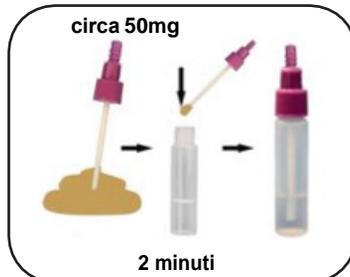

circa 50mg

2 minuti

5 Prelevare circa 50mg di campione. Inserire il campione nel tubo contenente 1mL di diluente e agitare per almeno 10 volte. Lasciare riposare per 2 minuti.




2 gocce

6 Rompere il tappo e dispensare 2 gocce di campione diluito nel pozzetto del dispositivo.



7 Attendere 15 minuti a temperatura ambiente.

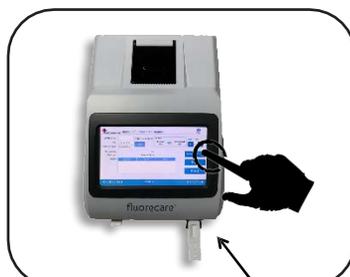

8 Inserire il dispositivo nell'analizzatore. Cliccare **【Test】** e leggere il risultato e cliccare **【Print】** se si vuole stampare il risultato.

Note:

- I Per campioni liquidi utilizzare micropipette professionali tarate.
- II I campioni refrigerati vanno portati a temperatura ambiente almeno 30 minuti prima di eseguire il test.
- III Per ulteriori specifiche fare riferimento al manuale di istruzioni.