




fluorecare[®] Intact Parathyroid Hormone (I-PTH) Diagnostic Kit


- Immunochromatographic Assay
- fluorecare[®] FIA Quantitative POCT Platform

- Certificazione: CE mark
- Sistema POCT: Point of Care test, risultati in 15 minuti
- Metodo: fluorimetrico con calibrazione interna
- Economico: Monotest, nessun costo extra
- Pratico: dosaggi e stoccaggio a temperatura ambiente
- Unico: unico POCT per il dosaggio del PTH
- Accurato: alta sensibilità analitica

Componenti

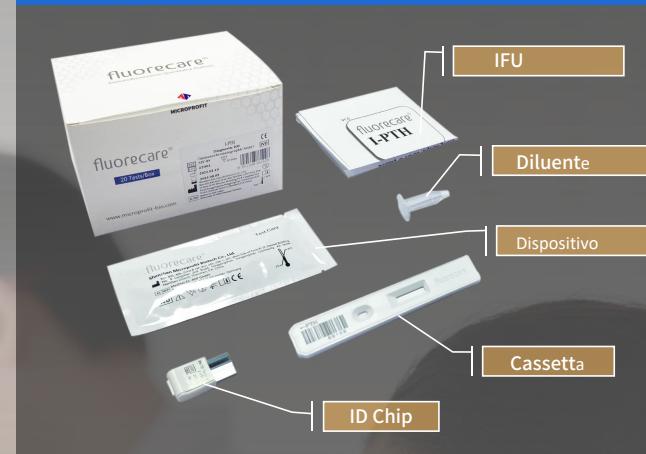

fluorecare[®] I-PTH VS Roche I-PTH

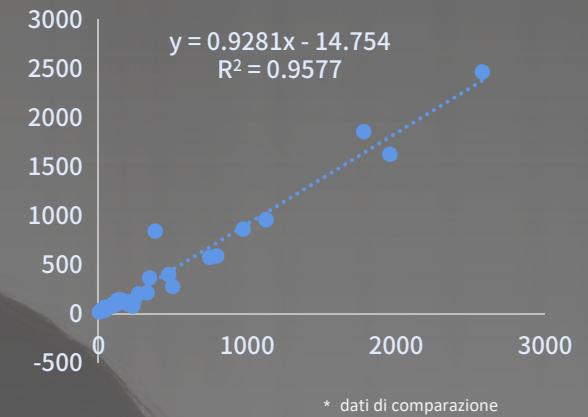

SPECIFICHE

| | |
|----------------------------|--|
| Metodo | Immunocromatografico fluorimetrico |
| Tempo del Saggio | 15 minuti |
| Emivita | 18 mesi |
| Temperatura di Stoccaggio | 2-30°C |
| Campione | Siero o plasma |
| Volume Campione | 100µL |
| Temperatura di incubazione | 20-25°C |
| Confezione | 20 Tests/box |
| Valori di riferimento | 15-65 pg/mL |
| Analizzatore | fluorecare [®] MF-T1000 Dry-type Immunofluorescence Quantitative Analyzer |

Procedura Analitica



1 Inserire l'ID chip, e premere **【Leggi ID Card】**



2 100µL di siero o plasma nella provetta con il diluente e miscelare bene.



3 70µL di campione diluito nel pozzetto del dispositivo e attendere 15 minuti.



4 Inserire il dispositivo nell'analizzatore. Premere **【Test】** e attendere il risultato.

